



Fundacja Linum
ul. Stałowska 147/149
52-412 Wrocław
Tel. 0796961644
leczenieinlem@gmail.com
www.leczenieinlem.pl

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem opatrunku.

Pojedyncze opakowanie zawiera jeden jałowy opatrunek o wielkości ~30cm x ~30cm.

Skład:

Len z antyoksydantami. Opatrunki lniane są wykonane z naturalnego materiału, grubo tkanego lnu, wzbogaconego w antyoksydanty przy użyciu metod inżynierii genetycznej.

Wskazania:

- owrzodzenia o etiologii żyłnej,
- owrzodzenia o etiologii cukrzycowej,
- odleżyny,
- oparzenia,
- rany wynikające z urazów mechanicznych,
- rany wynikające z urazów chemicznych

Leczenie opatrunkami lnianymi jest leczeniem miejscowym. Jest ono częścią kompleksowego leczenia owrzodzeń obejmującego min.: edukację chorych, ogólną antybiotykoterapię, leczenie choroby podstawowej, leczenie przeciwkrzepliwie i przeciwbólowe, w przypadku owrzodzeń żylnych, również kompresjoterapię.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Działania niepożądane:

Nie zaobserwowano niepożądanych działań lnianych opatrunków. W przypadku pojawienia się odczynu alergicznego (zaczerwienienie, obrzęk w otoczeniu rany) zaleca się konsultację z lekarzem.

Sposób użycia:

Opakowanie opatrunku otwierać dopiero przed użyciem. Opatrunek można przyciąć do wielkości rany, niewykorzystane fragmenty wyrzucić.

• *Etap 1*


Dokładnie umyć ranę. Lniany opatrunek zwilżyć jałową solą fizjologiczną i przyłożyć do owrzodzenia (rany). Następnie nałożyć 4-6 warstw gazy nasączonej jałową solą fizjologiczną i całość umocować bandażem. Po 24 godzinach opatrunek zmienić na świeży. Procedurę powtarzać przez 4 tygodnie i przejść do etapu 2.

• *Etap 2*

Dokładnie umyć ranę. Lniany opatrunek namoczyć jałową solą fizjologiczną i przy pomocy sterylnej strzykawki nanieść 3 ml ekstraktu 1 (przed użyciem wstrząsnąć) na stronę przykładaną do rany. Strzykawkę należy użyć jednorazowo. Następnie nałożyć 4-6 warstw gazy nasączonej jałową solą fizjologiczną i całość umocować bandażem. Po 24 godzinach opatrunek zmienić na świeży. Procedurę powtarzać przez 4 tygodnie i przejść do etapu 3.

• *Etap 3*

Dokładnie umyć ranę. Lniany opatrunek namoczyć jałową solą fizjologiczną i przy pomocy sterylnej strzykawki nanieść 3 ml ekstraktu 2 (przed użyciem wstrząsnąć) na stronę przykładaną do rany. Strzykawkę należy użyć jednorazowo. Następnie nałożyć 4-6 warstw gazy nasączonej jałową solą fizjologiczną i całość umocować bandażem. Po 24 godzinach opatrunek zmienić na świeży. Procedurę powtarzać przez 4 tygodnie.

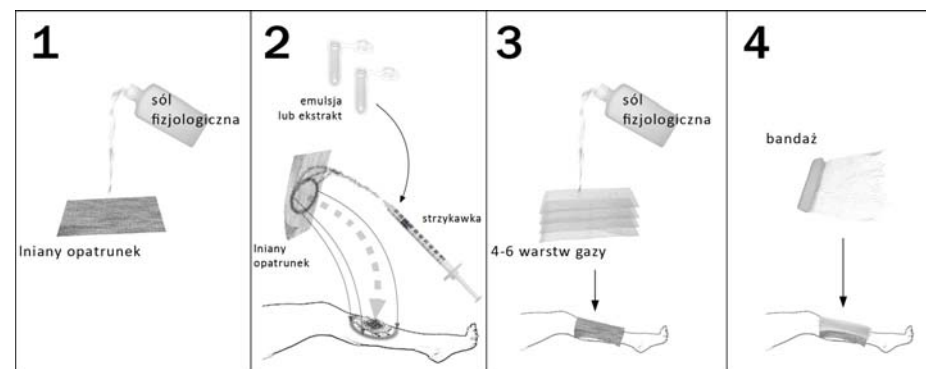

Przechowywanie:

Lniane opatrunki przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Pojemniki z emulsją i ekstraktem przechowywać w lodówce.

UWAGI:

Nie ekspozować miejsca z nałożonym opatrunkiem na działanie ciepła (poduszki, koców elektrycznych, termoforów, lamp, sauny, słońca itp.). Unikać zamoczenia. Sól fizjologiczną oraz sterylne strzykawki należy zakupić w aptece.